

Tellimusmeditsiiniseade

Toote nimetus: Individuaalselt valmistatud tallatoed

Tootja, levitaja: Empatrax OÜ, Liivalaia 32, Tallinn 10118, tel: 6000666, www.invaabi.ee, info@invaabi.ee

Näidustus:

Labajala asendi korrigeerimiseks, labajala vaevuste vähendamiseks (*hallux valgus*, lampjalgsus, jalalaba asendi toetamine jm; pidage nõu oma raviarstiga). Toode valmistatakse individuaalselt vaakummeetodil Teie jala järgi, mis tagab parima kohandumise Teie jalgade eripäradega.

Kasutamine:

- Tallatugi paigutada jalatsisse. Võimalusel eemaldada jalatsi originaaltald. Vajadusel kinnitada individuaalne tallatugi jalanõu külge selleks spetsiaalselt tallatoe alla paigutatud teibi abil.
- Tallatugede esmakordsel kasutamisel pidada kinni arsti või toote valmistanud spetsialisti poolt ettemääratud ajast toote kasutamise kestvuse kohta päevas. Esmakordsel kasutamisel vajab jalg tallatoega harjumiseks aega, millega seoses võib tallatugesid kasutada piiratud aja jooksul.
- Probleemide ilmnemisel seoses individuaalse tallatoe kasutamisega palume pöörduda Empatrax OÜ meistrite poole lahenduse leidmiseks.

Kestvus:

Pideva kasutamise korral on tallatugede kasutusaeg umbes 1 aasta.

Hooldamine:

- Vältige sisetaldade kokkupuudet keemiliste ainetega. Kõik nahast tallatoed on ettenähtud kandmiseks ainult kuiva ilmaga. Sisetaldade intensiivsel kasutamisel võib pealispind ära kuluda märksa kiiremini kui tavaliselt ja kaotab oma esialgse välimuse. Tallatugesid võib puhastada niiske lapi või švammiga.
- Mitte pesta pesumasinas või jooksva vee all. Kuivatada õhu käes toatemperatuuril, mitte kasutada kuivatamisel radiaatorit, pliiti, pesukuivatit ega lahtist tuld – materjal võib deformeeruda.

Liigitus:

Tellimusmeditsiiniseade on valmistatud kasutamiseks ainult konkreetsele patsiendile ja vastab olulistele nõuetele, mis on sätestatud meditsiiniseadme direktiivis (MDD) 93/42/EMÜ ja ka meditsiiniseadme seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Meditsiiniseade klass I toode.